



ジフィー™ ポリッシャー



- オートクレーブ滅菌可能（※ブラシ製品は再使用禁止）
- 研磨性に優れたシリコンラバー
- 3つの粗さ
- ラテックスフリー
- コンポジット研磨専用



4254 ジフィーコンポジット アジャスティング アンド ポリッシングキット

ジフィーカップ（粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個）
 ジフィーディスク（粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個）
 ジフィーポイント（粗め1個、ミディアム1個、ファイン1個）
 ジフィーコンポジット ポリッシングブラシ
 （レギュラー1個、ポイント1個）

848 ジフィーポリッシャー バラエティパック

ジフィーカップ
 （粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個）
 ジフィーディスク
 （粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個）
 ジフィーポイント
 （粗め4個、ミディアム4個、ファイン2個）



	カップ各20個	ディスク各20個	ポイント各20個
粗め	890	891	892
ミディアム	838	840	839
ファイン	841	843	842

ジフィー™ ハイシャイン

マイクロハイブリッドコンポジットレジン専用



- ダイヤモンドパウダー入りシリコンラバー
- 様々な症例に対応可能
- ラテックスフリー

	カップ 10個	ディスク 10個	ポイント 10個
ハイシャイン	3061	3062	3060-JP

販売名：Jiffy 研磨システム／一般の名称：歯科用口腔内清掃キット／
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000063

ダイヤモンドポリッシュミント



- 高品質のダイヤモンド微晶質粒子を含むコンポジットレジン研磨材
- 審美的な研磨に最適
- ポーセレン、コンポジットレジンの研磨に対応
- ミントフレーバーのため、口腔内でさわやかな香り



5540-JP ダイヤモンドポリッシュ ミント 0.5μm
 ミニリフィル 2本

5541-JP ダイヤモンドポリッシュ ミント 1.0μm
 ミニリフィル 2本

1.2mm シリンジ



196-JP ブラックミニチップ 20個

販売名：ブラックミニチップ／一般の名称：歯科用注入器具／
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

* Ultradent recommends the use of an aluminum block when autoclaving to prevent warping and deformation.
 1. realityesthetics.com.



ジフィー™ コンポジット ポリッシングブラシ

レギュラー・ポイント



ブラシ 1本ずつに練り込まれている様々な粒子がきめ細かい研磨を可能にします。



ゴールドのボディが見やすい

- 1000 以上の研磨用炭化ケイ素粒子を含むため、研磨後はきめ細かい仕上がりを得ることが可能
- コンポジットレジン、セラミックの白歯部咬合面へアクセスしやすい形状
- コンポジットレジンの研磨には低速回転で、高い RPM 数値の研磨が可能

推奨回転数: 1,000-3,000 RPM



咬合面の研磨に適した硬さのブラシ



850 ジフィー コンポジット ポリッシングブラシ レギュラー 10個
1009 ジフィー コンポジット ポリッシングブラシポイント 10個

ジフィー™ ゴートヘアブラシ

- 山羊の毛を使用
- ダイヤモンドポリッシュメントとの併用で光沢のある仕上がりに
- 少量の圧をかけながら、低速回転での研磨

推奨回転数: 15,000 RPM



1029 ジフィーゴートヘアブラシ 10個

製品比較表

製品画像	形状	色	粒子	砥粒	粒子サイズ	素材	推奨回転数	包装
	カップ	緑	粗め	炭化ケイ素	63 ミクロン	シリコンゴム	7,500 ~ 10,000rpm	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	黄	ミディアム	酸化アルミニウム	45 ミクロン	シリコンゴム	5,000 ~ 7,500rpm	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	白	ファイン	酸化アルミニウム	4 ミクロン	シリコンゴム	5,000 ~ 7,500rpm	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	青	ハイシャイン	ダイヤモンド	10 ミクロン	シリコンゴム	5,000 ~ 7,500rpm	20 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	レギュラー ブラシ	-	-	-	-	アラミド繊維	1,000 ~ 3,000rpm	10 個入り
	ポイント ブラシ							
	ゴートヘア ブラシ							