

エナメラスト

知覚過敏抑制材



- ・フッ化ナトリウム 5%
- ・程よい粘性があり、付属のブラシ / チップを使用して簡単に塗布
- ・選べるデリバリー方法
- ・ウォルターベリーフレーバー

エナメラスト塗布前と塗布後




エナメラスト塗布前



エナメラスト塗布後

象牙細管をシーリング

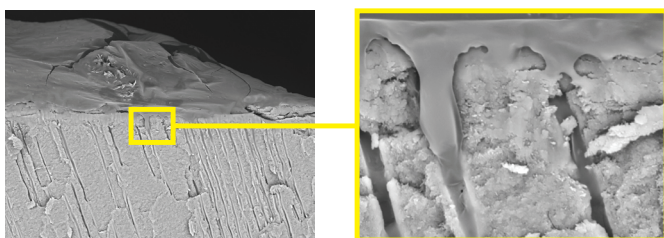

開口している象牙細管内にエナメラストが浸透することで細管をシーリングし、時間とともに細管内に結晶物を形成することで継続的な知覚過敏抑制も期待できます。

エナメラストの使用方法を動画で詳しく
見ることができます。




販売名：エナメラスト／一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料／管理医療機器／
医療機器認証番号：302AKBZX00040000／常温保存

選べるデリバリーシステムと適応症例

症例に合わせてデリバリー方法を選択可能。

ユニドースタイプ

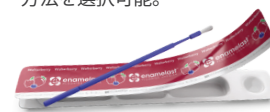

口腔内
全体に



ホワイトニング *1



ドライマウス *2



スケーリング後 *3



矯正ブラケット *4

シリンジタイプ



局所的に



くさび状欠損 *5



歯周病 *6



露出した根面 *7



酸蝕症 *8

出典：(*1*5*6*7*8.) 日本大学歯学部保存学教室修復学講座
(*2*3*4.) 松本デンタルオフィス (北海道) 松本 和久先生



4518-JP エナメラスト ウォルターベリー ユニドースタイプ 50個

50個 x 0.4 mL ユニドース
50枚 x 患者説明カード



4521-JP エナメラスト ウォルターベリーキット

2本 x 1.2 mL エナメラストウォルターベリーシリンジ
4個 x ソフトイーズチップ



4712 ソフトイーズチップ

50個 x ソフトイーズチップ



ウルトラシール XT プラス J

小窩裂溝封鎖材




保険適用
特定保険医療材料
歯科充填用材料！




- 高い接着力による高い維持率²
- 深い小窩裂溝の奥までデリバリーが可能
- 4色のシェード
- フィラー 58% による重合収縮抑制、耐摩耗性

ウルトラシールXTプラスJ使用前と使用後

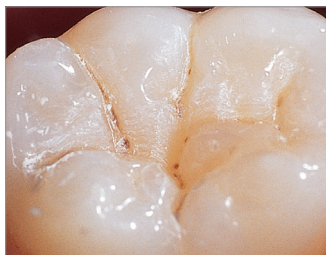

使用前

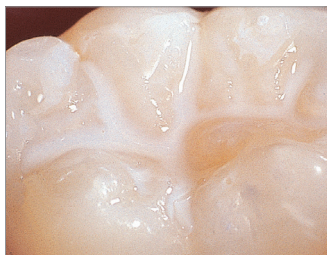

使用後




使用前の小窩裂溝




ウルトラシールXTプラスJにより小窩裂溝を塞ぐことでう蝕の予防が可能

使用方法

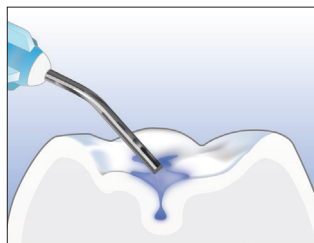


1. エッチング
ウルトラエッチJを塗布し15秒間放置します。

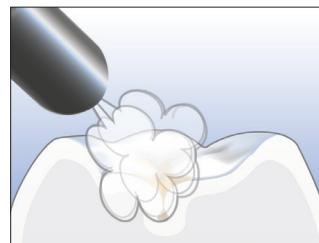


2. 洗浄・乾燥



3. プライミング
プライマドライJを塗布し5秒間放置し軽くエアブローします。

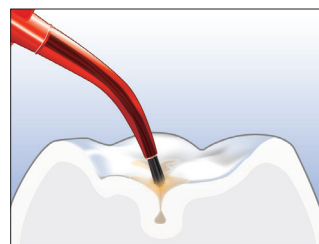

4. 充填
ウルトラシールXTプラスJをすり込みます。

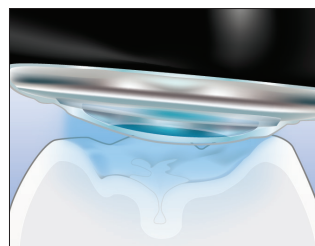

5. 光重合
VALOのエキストラパワーモードであれば3秒硬化2回で光重合が完了します。

プライマドライJ

乾燥材





- ウルトラシール XT プラス J と使用することで、小窩裂溝を乾燥させ、より高い接着が見込める。³
ブラックマイクロ FX チップ P58



716 プライマドライJ リフィル
1.2mL プライマドライJ × 4本

*Reality Ratings. Reality. Reality Publishing Company 1998-2017. 1. realityesthetics.com. 2. Boksman L, Carson B. Two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. *Gen Dent.* 1998;46(2):184-7. 3. Adams TJ, Frazier KB, Browning WD. Effect of drying agent use on sealant penetration [IADR abstract 363]. *J Dent Res.* 2000;79(suppl):189.

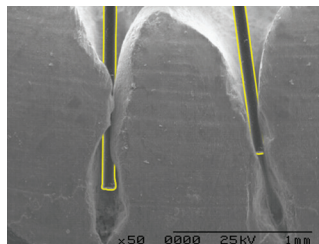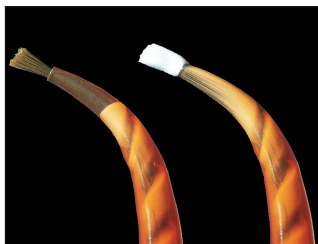

付属のインスパイラルブラシチップを使用することでチキソトロピー(ずり減粘性)が発生し、低粘度に変化することによって小窩裂溝の奥まで封鎖することが可能です。



ウルトラシールXT プラスJ リフィル

各4本	シェード
726	オペークホホワイトリフィル
565	クリアリフィル
1289	A1シェードリフィル
734	A2シェードリフィル

1.2mL ウルトラシールXTプラスJ × 4本

販売名：ウルトラシール XT プラス J / 一般の名称：高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号：223AKBZX00027000 / 特定保険医療材料：歯科充填用材料 I



710-JP インスパイラル ブラシチップ 20個

販売名：インスパイラルブラシチップ / 一般の名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000014



158-JP ブルーマイクロチップ(25G) 20個 127-JP ブルーマイクロチップ(25G) 100個

販売名：ブルーマイクロチップ / 一般の名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000009



1357 ブラックマイクロFXチップ 100個

販売名：ブラックマイクロ FX チップ / 一般の名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000081